

Dentto-Dam est un produit liquide qui protège les gencives pendant les procédures de blanchiment, de mordançage et de polissage des dents.

■ Champ d'application

1. Protection des gencives lors du blanchiment
2. Protection des gencives lors du mordançage
3. Lors du polissage des dents, etc.

■ Composants

1. Résine modifiée à base de méthacrylate (UDMA / TEGDMA)
2. Charge de dioxyde de silicium 1 à 10 %

■ Mode d'emploi

1. Précautions d'emploi

- ① Avant utilisation, vérifiez la date de péremption du produit, l'absence de corps étrangers et d'impuretés, ainsi que l'absence d'altération du produit.

Vérifiez l'état du produit avant d'en utiliser.

- ② Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du fabricant et respecter les consignes d'utilisation.
- ③ Lorsque vous êtes prêt à pratiquer l'intervention sur le patient, retirez le capuchon du produit et fixez l'embout.
- ④ Avant l'intervention, veillez à utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires.

2. Mode d'emploi

1) Protection gingivale

- ① Préparez les gencives en les nettoyant et en les séchant.
- ② Écartez les lèvres et préparez les instruments appropriés (rétracteurs de lèvres et de joues) pour éviter tout contact avec Dentto-Dam.
- ③ Appliquez Dentto-Dam sur la zone à traiter sur une largeur de 4 à 6 mm et une épaisseur de 1,5 à 2 mm.
- ④ Photopolymérisez pendant 15 à 20 secondes à l'aide d'un photopolymériseur.
(environ 400 mW/cm²)
- ⑤ Effectuez le processus de durcissement de manière uniforme, comme si vous le scanniez.
- ⑥ Une fois le traitement terminé, retirez le Dentto-Dam durci à l'aide d'un instrument des deux côtés.

2) Ruban caoutchouc pour l'isolation gingivale

- ① Isolez la zone de travail à l'aide d'une digue en caoutchouc.
- ② Pour sceller le Dentto-Dam, appliquez d'abord une couche de Dentto-Dam.
- ③ Photopolymérisez pendant 15 à 20 secondes à l'aide d'un photopolymériseur.
(environ 400 mW/cm²)
- ④ Effectuez le processus de durcissement de manière uniforme, comme si vous scanniez.
- ⑤ Procédez au traitement dentaire.
- ⑥ Une fois le traitement terminé, retirez le Dentto-Dam à l'aide d'un instrument.

■ Contre-indications

1. Ne pas utiliser chez les patients présentant des antécédents d'hypersensibilité ou d'allergie aux résines de type méthacrylate.
2. La réutilisation des embouts fournis peut entraîner une infection croisée. Il est donc interdit de réutiliser les embouts.

■ Précautions

1. Ce produit est un « dispositif médical ».
2. La résine non durcie peut provoquer une réaction cutanée chez certaines personnes. Dans ce cas, lavez soigneusement la peau exposée à la résine avec du savon et de l'eau.
3. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'éruptions cutanées, de dermatites ou d'hypersensibilité.

4. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur les tissus buccaux. Veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec les yeux.
5. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin si nécessaire.
6. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues ni par des personnes non qualifiées.
7. Il doit être utilisé uniquement par des dentistes et des professionnels de la dentisterie.
8. Conservez-le hors de portée des enfants, des personnes âgées et de toute autre personne n'étant pas utilisatrice de soins dentaires.
9. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
10. Ne pas soumettre le produit à des chocs excessifs afin d'éviter tout risque de détérioration.
11. Lors de l'utilisation de ce produit, n'utilisez pas d'autres composants que ceux fournis.

■ Conditions de conservation

1. Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil.

2. Conservez le produit à une température

comprise entre 1 et 30 °C.



■ Composition

- # 402-1 Dentto-Dam 1,2 ml x 5 seringues, embouts jetables

■ Date de péremption

3 ans à compter de la date de fabrication

Contact pour signaler les effets indésirables (Centre coréen d'information sur la sécurité des dispositifs médicaux 080-080-4183)

Liquide photopolymérisable pour digue en caoutchouc.

Protection gingivale ou blanchiment, mordançage, microabrasion et sablage, etc. Obturation gingivale à l'aide d'une digue en caoutchouc.

■ Indications

Protection gingivale pendant les traitements dentaires :

1. Blanchiment
2. Mordançage
3. Microabrasion, sablage, etc.

■ Composition

1. Résine modifiée à base de méthacrylate (UDMA / TEGDMA)
2. Charge de dioxyde de silicium 1 à 10 %

■ Application

1. Avant l'application

- ① Vérifiez la date de péremption et méfiez-vous des emballages contaminés.
- ② Suivez les instructions avant utilisation.
- ③ Lorsque vous êtes prêt à administrer le produit au patient, retirez le capuchon du produit et fixez l'embout.
- ④ Assurez-vous qu'un dispositif de protection respiratoire est en place avant l'intervention.



2. Application

1) POUR LA PROTECTION GINGIVALE.


- ① Nettoyer et sécher la gencive.
- ② Placez l'instrument approprié (écarteur buccal et étiquette) afin d'écarter les lèvres et d'éviter de mettre en contact avec Dentto-Dam.
- ③ Appliquez le Dentto-Dam sur la zone d'application sur une épaisseur de 4 à 6 mm et une largeur de 1,5 à 2 mm.



- ④ Cure pendant 15 à 20 secondes à l'aide d'une lampe à polymériser.
(environ 400 mW/cm²)
- ⑤ Effectuer le processus de polymérisation de manière uniforme en effectuant des mouvements de balayage.
- ⑥ Après le traitement, retirer le Dentto-Dam polymérisé à l'aide d'un instrument de chaque côté.

2) POUR LE SCELLAGE GINGIVAL AVEC DIGUE EN CAOUTCHOUC.

- ① Isolez la zone de travail à l'aide d'une digue en caoutchouc.
- ② Afin de sceller le Dentto-Dam, appliquez une couche de Dentto-Dam.
- ③ Polymérisez pendant 15 à 20 secondes à l'aide d'une lampe à polymériser (environ 400 mW/cm²).
- ④ Effectuez le processus de polymérisation de manière uniforme en effectuant un mouvement de balayage.
- ⑤ Procédez au traitement dentaire.
- ⑥ Une fois le traitement terminé, retirez-le à l'aide de l'instrument.

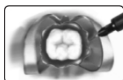

■ Contre-indications

1. Ne pas utiliser chez les patients présentant des antécédents d'hypersensibilité ou d'allergies aux résines à base de méthacrylate.
2. La réutilisation de l'embout fermé peut entraîner une infection croisée, il est donc interdit de réutiliser l'embout.

■ Précautions


1. À usage dentaire uniquement.
2. La résine non durcie peut provoquer une irritation cutanée selon les individus. Dans ce cas, lavez soigneusement la zone affectée à l'eau et au savon.
3. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'éruption cutanée et d'hypersensibilité à la dermatite.
4. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur les tissus buccaux. Veillez à ne pas le mettre en contact avec les yeux.
5. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un spécialiste si nécessaire.
6. Ce produit est interdit à toute utilisation autre que celle pour laquelle il est prévu. Son utilisation par des non-professionnels est interdite.
7. Respectez la procédure et les précautions d'emploi.
8. Gardez-le hors de portée des utilisateurs non dentaires, y compris les enfants, les personnes âgées et autres.

9. Ne pas utiliser après la date de péremption.

10. Il existe un risque d'endommagement du produit, ne pas exercer de pression excessive.
11. Lors de l'utilisation de ce produit, il est interdit d'utiliser d'autres composants que ceux fournis.

■ Stockage

1. Évitez l'exposition directe au soleil.
2. Conserver à une température comprise entre 1 et 30 °C.

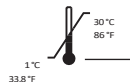

■ Contenu

402-1 Dentto-Dam 1,2 ml x 5 seringues, embouts jetables

■ Durée de conservation

3 ans à compter de la date de fabrication



KTR EUROPE GMBH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Allemagne
Téléphone : +49-6196-887170

SYMBOLES

: Date limite d'utilisation	: Code de lot
: Attention	: Garder au sec
: Fabricant	: Date de fabrication
: Représentant agréé dans la Communauté européenne	
: Limite de température	: Consulter le mode d'emploi
: Tenir à l'abri de la lumière	: Numéro de catalogue
: Numéro de modèle	: Identifiant unique de l'appareil
: Dispositif médical	: Ne pas réutiliser
: Dispositif non stérile	

MEDICLUS CO., LTD.

No.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do 28576, République de Corée
Tél. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
E-mail : sales@mdclus.com