

**One-Stop est un produit dentaire de type pâte à appliquer dans la poche gingivale afin d'éliminer les saignements et le liquide gingival, et d'élargir temporairement la poche gingivale pour faciliter la prise d'empreintes précises et nettes.**

### ■ Champ d'application

1. Lorsqu'il est nécessaire d'arrêter localement le saignement et d'éliminer l'humidité dans la poche gingivale intra-orale
2. Pour la prise d'empreintes prothétiques ou le traitement pré-restauration
3. Avant la fabrication d'un tenon radiculaire en cas de récession gingivale
4. Avant la pose d'une restauration, pour obtenir un champ de vision dégagé

### ■ Composants

Astringent à base de chlorure d'aluminium

### ■ Mode d'emploi

1. Préparation avant utilisation
  - ① Avant utilisation, vérifiez la date de péremption du produit, l'absence de corps étrangers et d'impuretés, ainsi que l'absence d'altération ou d'anomalie.
  - ② Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du fabricant et respecter les instructions d'utilisation.
  - ③ Lorsque vous êtes prêt à administrer le produit au patient, retirez le capuchon du produit.
  - ④ Avant l'intervention, veillez à utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires.
2. Mode d'emploi
  - 1) Zone d'application
    - ① Vérifiez l'état de la zone à traiter (sillon gingival et tissus gingivaux environnants).
    - ② Si nécessaire, nettoyez délicatement la bouche en retirant les corps étrangers, le sang, les sécrétions, etc.
    - ③ Vérifiez qu'il n'y a pas d'infection active, d'inflammation grave ou d'ulcération au niveau du site d'injection.
    - ④ Le produit est fourni sous forme de seringue à usage unique. Fixez l'embout à la seringue.
  - 2) Application du produit
    - ① Appliquez lentement le produit One-Stop préparé à l'aide de l'embout sur la zone à traiter.
    - ② Appliquez suffisamment de produit pour remplir complètement la poche gingivale, mais évitez toute injection excessive.
    - ③ Si nécessaire, injectez une petite quantité supplémentaire pour recouvrir uniformément la poche gingivale.
  - 3) Durée d'application
    - ① Après application du produit, laissez agir pendant environ 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, le produit absorbe le liquide et les saignements légers dans la poche gingivale et induit une expansion temporaire de la poche gingivale grâce à son action astringente.
  - 4) Retrait du produit
    - ① Après 2 à 3 minutes, rincez soigneusement les résidus du produit à l'eau claire ou à l'aide d'une solution saline physiologique.
    - ② Rincez à l'aide d'une légère pression d'eau afin d'éliminer tous les résidus du produit dans la poche gingivale.
    - ③ Si des résidus persistent, utilisez une pointe d'aspiration ou un spray air-eau pour les éliminer.
  - 5) Post-traitement
    - ① Une fois le nettoyage du produit terminé, procédez à la prise d'empreinte à l'aide d'un matériau d'empreinte.
    - ② Si nécessaire, vérifiez à nouveau l'intérieur de la bouche pour vous assurer qu'il n'y a pas de lésions muqueuses ou de réactions d'hypersensibilité.
    - ③ Ne réutilisez pas les produits et embouts usagés. Jetez-les comme des déchets médicaux.

### ■ Contre-indications

2. Ne pas utiliser ce produit chez les patients ayant des antécédents d'hypersensibilité tels que des éruptions cutanées ou des dermatites.
3. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur les tissus buccaux. Veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec les yeux.
4. Si une éruption cutanée ou d'autres symptômes d'hypersensibilité apparaissent pendant l'utilisation de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un dermatologue.
5. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues ni par des personnes non qualifiées.
6. Il doit être utilisé uniquement par des dentistes et des spécialistes dentaires.
7. Conservez-le hors de portée des enfants, des personnes âgées et de toute autre personne non concernée par les soins dentaires.
8. Vérifiez le numéro de fabrication et la date de péremption avant utilisation.
9. Ne pas soumettre le produit à des chocs excessifs afin d'éviter tout risque de détérioration.
10. Lors de l'utilisation de ce produit, n'utilisez que les composants fournis.

### ■ Effets secondaires

Les effets secondaires comprennent, sans s'y limiter, les suivants.

1. Une légère sensation de picotement, de brûlure ou une irritation temporaire peuvent survenir.
2. En cas de réaction allergique (éruption cutanée, œdème, difficultés respiratoires, etc.), cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
3. Une application excessive ou des résidus peuvent endommager les muqueuses et entraîner une infection secondaire.

### ■ Mode de conservation

1. Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Conserver à une température comprise entre 1 et 30 °C.



### ■ Composition

1. Ne pas utiliser ce produit chez les patients présentant une hypersensibilité ou des antécédents d'allergie à l'un de ses composants (par exemple, le chlorure d'aluminium).
2. Ne pas utiliser sur des zones présentant une infection active, une parodontite sévère, une ulcération gingivale ou une plaie ouverte.
3. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans et chez les patients présentant une immunodéficience grave.
4. La réutilisation des embouts fournis peut entraîner une infection croisée. Il est donc interdit de réutiliser les embouts.

### ■ Précautions

1. Ce produit est un « dispositif médical ».

1101-1 One-Stop Blue 0,85 g x 7 seringues, embouts jetables

#

1101-2 One-Stop Blue 0,85 g x 2 seringues, embouts jetables

#

**■ Durée de conservation**

2 ans à compter de la date de fabrication

Contact pour les questions relatives aux effets indésirables (Centre coréen d'information sur la sécurité des dispositifs médicaux 080-080-4183)

One-Stop est un produit de prétraitement dentaire de type pâte à appliquer dans le sulcus gingival afin d'éliminer le sang et le liquide sulculaire et d'élargir temporairement le sulcus. Il est destiné à faciliter l'obtention d'empreintes dentaires précises et nettes.

**■ Indications**

- 1. Hémostase locale et contrôle de l'humidité dans le sulcus gingival
- 2. Prétraitement avant les empreintes prothétiques ou les restaurations
- 3. Avant la reconstitution du noyau pour la rétraction gingivale
- 4. Pour garantir une bonne visibilité avant les procédures adhésives

**■ Composition**

Agent astringent à base de chlorure d'aluminium

**■ Mode d'emploi**

- 1. Avant l'application
  - ① Vérifiez la date de péremption et assurez-vous que l'emballage n'est pas contaminé.
  - ② Suivez les instructions avant utilisation.
  - ③ Lorsque vous êtes prêt à administrer le produit au patient, retirez le bouchon du produit.



④ Veillez à porter un masque de protection respiratoire avant l'intervention.

2. Applications

1) Vérifiez le site d'application

- ① Évaluez l'état du sulcus gingival et des tissus environnants.
- ② Si nécessaire, éliminez délicatement les débris, le sang ou les liquides afin de nettoyer la zone.
- ③ Assurez-vous que la zone d'application ne présente pas d'infection active, d'inflammation grave ou d'ulcères.

2) Application

- ① Appliquez lentement One-Stop à l'aide de l'embout sur la zone souhaitée.
- ② Appliquez suffisamment de produit pour remplir le sulcus gingival.  
Évitez toute injection excessive.
- ③ Ajoutez une petite quantité si nécessaire pour assurer une couverture uniforme.

3) Temps d'application

Laissez le produit en place pendant environ 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, le matériau absorbe les liquides et les saignements mineurs, et induit une expansion temporaire du sulcus gingival par son action astringente.

4) Retrait

- ① Après 2 à 3 minutes, rincez abondamment à l'eau claire ou au sérum physiologique.
- ② Utilisez une pression d'eau douce pour vous assurer que tout le produit résiduel est éliminé.
- ③ Si des résidus persistent, retirez-les à l'aide d'une pointe d'aspiration ou d'un jet d'air et d'eau.

5) Après l'intervention

- ① Une fois le rinçage terminé, procédez à la prise d'empreinte.
- ② Réévaluez la cavité buccale pour vous assurer qu'il n'y a pas de lésion muqueuse ou d'hypersensibilité.
- ③ Ne réutilisez pas la seringue ou l'embout. Jetez les articles usagés comme déchets médicaux.

▣ Contre-indications

1. Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité ou des antécédents de réactions allergiques à l'un des composants du produit (par exemple, le chlorure d'aluminium).
2. Ne pas appliquer sur des zones présentant des infections actives, une parodontite sévère, des ulcères gingivaux ou des plaies ouvertes.
3. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans ou chez les patients présentant une fonction immunitaire fortement compromise.
4. La réutilisation de l'embout fourni peut entraîner une infection croisée. Il est donc interdit de réutiliser l'embout.

▣ Précautions

1. À usage dentaire uniquement.
2. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents connus d'hypersensibilité, tels que des éruptions cutanées ou une dermatite causées par ce produit.
3. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur les tissus buccaux.
4. Si des symptômes d'hypersensibilité tels qu'une éruption cutanée apparaissent pendant l'utilisation, cessez l'utilisation et consultez un dermatologue.
5. Ce produit est interdit à toute utilisation autre que celle pour laquelle il est destiné et son utilisation par des non-professionnels n'est pas autorisée.

6. Suivez la procédure et respectez toutes les précautions.

7. Tenir hors de portée des utilisateurs non dentaires, y compris les enfants et les personnes âgées.

8. Vérifiez toujours le numéro de lot et la date d'expiration avant utilisation.

9. Manipulez le produit avec précaution afin d'éviter tout dommage, en évitant tout choc excessif.

10. L'utilisation de ce produit autrement que comme composant est interdite.


▣ Effets indésirables

Les effets indésirables peuvent inclure, sans s'y limiter :

1. Légère sensation de picotement, de brûlure ou irritation temporaire.
2. Réactions allergiques telles qu'éruption cutanée, gonflement ou difficulté à respirer : cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.
3. Une application excessive ou des résidus peuvent causer des lésions muqueuses ou une infection secondaire.

▣ Conservation

1. Éviter l'exposition directe au soleil.
2. Conserver à une température comprise entre 1 °C et 30 °C.

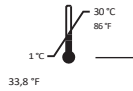

▣ Contenu

- # 1101-1 One-Stop Blue 0,85 g x 7 seringues, embouts jetables # 1101-2 One-Stop Blue 0,85 g x 2 seringues, embouts jetables

▣ Durée de conservation

2 ans à compter de la date de fabrication

SYMBOLES

: Date limite d'utilisation	: Code de lot
: Attention	: Conserver au sec
: Fabricant	: Date de fabrication
: Représentant agréé dans la Communauté européenne	
: Représentant agréé dans la Communauté européenne	: Consulter le mode d'emploi
: Tenir à l'abri de la lumière du soleil	: Numéro de catalogue
: Pays de fabrication	: Numéro de modèle
: Identifiant unique du dispositif	: Dispositif médical
: Ne pas réutiliser	: Dispositif non stérile
: Ne pas réutiliser	: Dispositif non stérile

MEDICLUS CO., LTD.

No.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,  
Chungcheongbuk-do 28576, Corée  
Tél. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866  
E-mail : sales@mdclus.com