



5. Toute utilisation autre que celle prévue est interdite. L'usage par des non-professionnels est également interdit.
6. Suivre le mode d'emploi et respecter toutes les précautions.
7. Tenir hors de portée des personnes non professionnelles, y compris les enfants, les personnes âgées et autres.
8. Ne pas utiliser après la date de péremption.
9. Éviter tout choc excessif en raison du risque d'endommagement du produit.
10. Il est interdit d'utiliser d'autres éléments que ceux fournis avec le produit.

Conservation

1. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil.
2. Conserver à une température comprise entre 1°C et 30°C.




Contenu

507 Canal-Seek 3 ml × 1 seringue, embouts pinceaux

Durée de conservation

2 ans à compter de la date de fabrication

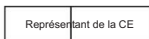

KTR EUROPE GMBH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn,
Allemagne
Téléphone : +49-6196-887170

SYMBOLES

	: Date limite d'utilisation		: Code du lot
	: Attention		: Garder au sec
	: Fabricant		: Date de fabrication
	: Représentant autorisé dans la Communauté européenne		: Limite de température
	: Éviter la lumière du soleil		: Consulter le mode d'emploi
	: Pays de fabrication		: Numéro de catalogue
	: Identifiant unique de l'appareil		: Numéro de modèle
	: Ne pas réutiliser		: Dispositif médical

MÉDECINE SOCIÉTÉ, LTD.

No. 1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Corée

Tél. +82-43-211-2877 / Télécopie. +82-43-211-2866

Courriel : sales@mdclus.com

Rév. 0 04/08/2025 MDI-CSFR00-00



Canal-Seek™

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Instructions d'utilisation

Canal-Seek est un indicateur des orifices canaux.

Canal-Seek est destiné à être utilisé lors d'un traitement endodontique pour identifier les orifices canaux. Le colorant bleu contenu dans le produit pénètre dans les orifices canaux et les colore en bleu, facilitant ainsi la localisation des principaux orifices canaux et détecter les fissures.

Canal-Seek est un révélateur d'orifices canaux.

Il est destiné à être utilisé pendant un traitement endodontique afin d'identifier les orifices des canaux radiculaires.

Le colorant bleu contenu dans le produit pénètre dans les orifices et les colore en bleu, ce qui facilite la localisation des orifices principaux ainsi que la détection des fissures

Canal-SeekTM révélateur d'orifices canalaire



Canal-Seek est un indicateur des orifices canalaire. Canal-Seek est destiné à être utilisé

Lors d'un traitement endodontique, un colorant bleu est utilisé pour identifier les orifices canalaire. Ce colorant pénètre dans les orifices et les colore en bleu, facilitant ainsi la localisation des principaux orifices canalaire et la détection des problèmes de fissures.

Indications

1. Identification des zones de fissures
2. Identification des zones cariées
3. Identification de l'orifice canalaire

Compositions

Bleu de méthylène, propylène glycol, eau Ph. Eur

Méthode de candidature

1. Avant la demande

Vérifiez la date de péremption et soyez prudent si l'emballage est contaminé.

Suivez les instructions avant utilisation.

Lorsque vous êtes prêt à administrer la procédure au patient, retirez le bouchon du produit.

Assurez-vous de porter un dispositif de protection respiratoire avant la procédure.

2. Applications

Avant le traitement, désinfectez l'embout fourni avec de l'alcool éthylique puis fixez-le à la seringue.

Après avoir retiré la dentine à l'endroit où se trouvent les orifices des canaux radiculaires

Si la carie est présente, appliquez 1 à 2 gouttes de Canal-Seek sur la zone cariée et attendez 5 à 10 secondes. Rincez ensuite et séchez la cavité.

Les points fortement colorés en bleu indiquent les orifices canalaire. Retirez

le piston de la seringue pour éviter tout débordement de Canal-Seek.

Retirez l'embout de la seringue, puis refermez-la avec le capuchon pour le rangement.

Contre-indications

1. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'hypersensibilité à ce produit.
2. La réutilisation de l'embout fourni peut entraîner une contamination croisée ; par conséquent, la réutilisation de l'embout est interdite.

Mises en garde

1. Pour usage dentaire uniquement.

2. Il n'est pas utilisé chez les patients ayant des antécédents d'éruption cutanée et d'hypersensibilité à dermatite.
3. Ce produit est destiné uniquement à l'hygiène buccale. Évitez tout contact avec les yeux.
4. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. avec de l'eau propre et consulter un spécialiste si nécessaire.
5. Ce produit ne peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Le recours à des non-professionnels est interdit.
6. Respectez la procédure et les précautions.
7. Tenir hors de portée des personnes non professionnelles de santé bucco-dentaire, y compris les enfants. personnes âgées et autres.
8. Ne pas utiliser après la date de péremption.
9. Il existe un risque d'endommagement du produit, veuillez donc éviter les chocs excessifs.
10. Lors de l'utilisation de ce produit, toute utilisation autre que celle des composants est interdite.

Stockage

1. Évitez l'exposition directe au soleil.
2. Conserver à une température comprise entre 1°C et 30°C.

Sommaire

LN-507 Canal-Seek 3 ml x 1 seringue, embouts de brosse

Durée de conservation

- 2 ans à compter de la date de fabrication

Canal-Seek est un révélateur d'orifices canalaire. Il est destiné à être

utilisé pendant un traitement endodontique afin d'identifier les orifices des canaux radiculaires. Le colorant bleu contenu dans le produit pénètre dans les orifices et les colore en bleu, ce qui facilite la localisation des orifices principaux ainsi que la détection des fissures.


Indications

1. Identification des zones fissurées
2. Identification des zones cariées
3. Identification des orifices des canaux radiculaires

Composition

Bleu de méthylène, Propylène glycol, Eau Ph. Eur

Méthode d'application

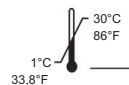

1. Avant l'application

Vérifier la date de péremption et s'assurer que l'emballage n'est pas contaminé.

Suivre les instructions d'utilisation avant emploi.

Lorsque la procédure est prête à être effectuée sur le patient, retirer le bouchon du produit.

Porter un dispositif de protection respiratoire avant la procédure.

2. Application

Avant le traitement, désinfecter l'embout fourni avec de l'alcool éthylique, puis le fixer sur la seringue.

Après avoir retiré la dentine à l'endroit où les orifices canalaire sont présumés, appliquer 1 à 2 gouttes de Canal-Seek sur la zone cariée et attendre 5 à 10 secondes. Ensuite, rincer et sécher la cavité.

Les zones intensément colorées en bleu indiquent les orifices canalaire.

Tirer le piston de la seringue vers l'arrière pour éviter tout débordement de Canal-Seek, retirer l'embout et refermer la seringue avec son bouchon pour le stockage.

Contre-indications

1. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'hypersensibilité à ce produit.
2. La réutilisation de l'embout fourni peut provoquer une infection croisée sa réutilisation est donc interdite.

Précautions d'emploi

1. Réserve à un usage dentaire.
2. Ne pas utiliser chez les patients ayant des antécédents d'éruptions cutanées ou d'hypersensibilité dermatologique.
3. Ce produit est destiné uniquement aux tissus buccaux. Éviter tout contact avec les yeux.
4. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire à plusieurs reprises et consulter un spécialiste de santé si nécessaire.