



2-3 Application avec dentifrice

Appliquer une quantité appropriée de Desens Bio-Care sur une brosse à dents, puis répartir uniformément sur les dents sensibles.

Appliquer ensuite le dentifrice sur la brosse à dents, puis brosser les dents en combinant le dentifrice et Desens Bio-Care pendant 3 à 5 minutes.

Rincer à l'eau les résidus de dentifrice et de Desens Bio-Care.

Conseiller au patient de ne pas manger ni boire pendant 1 heure.

Contre-indications

Ne pas utiliser ce produit chez les patients ayant des antécédents connus d'allergie à l'un de ses composants.

Précautions d'emploi

1. Ce produit est un « dispositif médical » et ne doit être utilisé qu'après avoir reçu des instructions appropriées sur son utilisation et ses précautions par un professionnel dentaire.
2. En cas d'apparition de symptômes inhabituels tels qu'une éruption cutanée ou une dermatite après utilisation, arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.
3. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante, puis consulter un ophtalmologiste.
4. Utiliser ce produit uniquement jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'emballage.
5. Manipuler avec précaution afin d'éviter tout dommage au produit.
6. Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
7. Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Mises en garde

1. Ce produit contenant des ions fluorure, éviter impérativement de l'avaler.
2. Après application du produit, s'abstenir de consommer de l'eau ou des aliments pendant au moins 1 heure afin d'éviter l'absorption du fluorure par l'organisme.

Conservation


1. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
2. Bien refermer le bouchon après utilisation pour le stockage.
3. Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

Contenu

401-4 Desens Bio-Care 30 ml × 1 unité

Durée de conservation

2 ans à compter de la date de fabrication

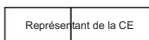

KTR EUROPE GMBH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn,
Allemagne

Téléphone : +49-6196-887170

SYMBOLES

: Date limite d'utilisation	: Code du lot
: Attention	: Garder au sec
: Fabricant	: Date de fabrication
: Représentant autorisé dans la Communauté européenne	
: Limite de température	: Consulter le mode d'emploi
: Éviter la lumière du soleil	: Numéro de catalogue
: Pays de fabrication	: Numéro de modèle
: Identifiant unique de l'appareil	: Dispositif médical
: Ne pas réutiliser	

MÉDECINE SOCIÉTÉ, LTD.

No. 1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,

Chungcheongbuk-do 28576, Corée

Tél. +82-43-211-2877 / Télécopie. +82-43-211-2866

Courriel : sales@mdclus.com

Rév. 0 04/08/2025 MDI-DBFR00-00



DESENS® Bio-Soin

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Instructions d'utilisation

Desens Bio-Care est utilisé pour faciliter la reminéralisation de surfaces dentaires déminéralisées. Ce procédé utilise un verre bioactif mésoporeux (MBG) à structure amorphe pour une régénération rapide. Elle ionise le calcium et le phosphore dans la cavité buccale, permettant ainsi la transformation des surfaces dentaires déminéralisées en hydroxyapatite. De plus, elle assure une protection contre les bactéries cariogènes et les substances acides.

Desens Bio-Care est utilisé pour favoriser la reminéralisation des surfaces dentaires déminéralisées. Il utilise du verre

bioactif mésoporeux (MBG) à structure amorphe afin d'ioniser rapidement le calcium et le phosphore dans la cavité buccale, permettant ainsi la transformation des surfaces dentaires déminéralisées en hydroxyapatite. Il offre en outre une protection contre les bactéries cariogènes et les substances acides.

DESENS® Bio-Soin Reminéralisation des surfaces dentaires déminéralisées



Desens Bio-Care est utilisé pour faciliter la reminéralisation des surfaces dentaires déminéralisées. Il utilise un verre bioactif mésoporeux (MBG) à structure amorphe pour ioniser rapidement le calcium et le phosphore dans la cavité buccale, permettant ainsi la transformation des surfaces dentaires déminéralisées en hydroxyapatite. De plus, elle offre une protection contre les bactéries cariogènes et les substances acides.

Indications

- Reminéralisation des surfaces dentaires fragilisées au stade initial de la carie et Lésions à taches blanches.
- Reminéralisation des surfaces dentaires fragilisées après des interventions dentaires telles que le détartrage, le blanchiment et les traitements orthodontiques.
- Reminéralisation des surfaces dentaires vieillissantes affectées par la récession gingivale, la sensibilité et la décoloration.
- Reminéralisation des surfaces dentaires pour la prévention et le soulagement des caries dentaires sensibilité.

Compositions

MBG (verre bioactif mésoporeux), fluorure de sodium, eau distillée, glycérine

Méthode de candidature

1. Avant la demande

Vérifiez la date de péremption et soyez prudent si l'emballage est contaminé.

Lisez et suivez les instructions d'utilisation du fabricant.

Brossez-vous les dents ou rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau.

2. Application

Application 2-1 Plateau

Rincez soigneusement le plateau sous l'eau courante.

Extrudez suffisamment de Desens Bio-Care pour recouvrir la surface du porte-empreinte, puis

appliquez le porte-empreinte sur les dents supérieures et/ou inférieures.

Laissez le plateau sans le toucher dans la bouche pendant au moins 3 minutes.

Retirez le plateau.

Demandez au patient d'utiliser sa langue pour répartir uniformément le reste de Desens Bio-Care dans sa bouche et de le garder en bouche le plus longtemps possible (au moins 2 minutes), en évitant de recracher et d'avaler. Plus le Desens Bio-Care et la salive restent longtemps en bouche, plus le résultat est efficace.

Rincez abondamment à l'eau toute trace de Desens Bio-Care. Conseillez au patient de ne pas manger ni boire pendant 1 heure.

2-2 Application sans plateau

Appliquez une quantité appropriée de Desens Bio-Care sur un coton-tige, une brosse ou un doigt ganté, et étalez-la uniformément sur la surface de la dent.

Laissez le plateau en bouche sans le toucher pendant au moins 3 minutes.

Demandez au patient d'utiliser sa langue pour répartir uniformément le reste de Desens Bio-Care dans sa bouche et de le garder en bouche le plus longtemps possible (au moins 2 minutes), en évitant de recracher et d'avaler. Plus le Desens Bio-Care et la salive restent longtemps en bouche, plus le résultat est efficace.

Rincez à l'eau toute trace de Desens Bio-Care restante. Conseillez au patient de ne pas manger ni boire pendant 1 heure.

2-3 Utilisation avec du dentifrice

Appliquez une quantité appropriée de Desens Bio-Care sur une brosse à dents et répartissez-la uniformément sur les dents sensibles.

Appliquez du dentifrice sur la brosse à dents et brossez-vous les dents avec le dentifrice et Desens Bio-Care pendant 3 à 5 minutes.

Rincez à l'eau tout résidu de dentifrice et de Desens Bio-Care.

Conseillez au patient de ne ni manger ni boire pendant 1 heure.

Contre-indications

Ne pas utiliser ce produit chez les patients ayant des antécédents connus d'allergies à l'un de ses composants.

Mises en garde

- Ce produit est un « dispositif médical » et ne doit être utilisé qu'après réception d'une notice. Des instructions adéquates sur son utilisation et les précautions à prendre, fournies par un professionnel dentaire.
- Si des symptômes anormaux tels qu'une éruption cutanée ou une dermatite apparaissent après l'utilisation de ce produit, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
- Utilisez ce produit avec précaution pour éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau courante et consultez un ophtalmologiste.
- Utilisez ce produit uniquement avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Manipuler avec précaution pour éviter d'endommager le produit.
- Conservé hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Avertissements

- Ce produit contenant des ions fluorure, veillez à éviter de l'avaler.
- Après application du produit, s'abstenir de consommer de l'eau et des aliments pendant au moins 1 heure afin d'éviter l'absorption du fluorure par l'organisme.

Stockage

- À conserver dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Bien refermer le couvercle après utilisation pour le rangement.
- Conservé hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

Sommaire

401-4 Desens Bio-Care 30 ml x 1 unité

Durée de conservation

2 ans à compter de la date de fabrication

Desens Bio-Care est utilisé pour favoriser la reminéralisation des surfaces dentaires déminéralisées. Il utilise du verre bioactif mésoporeux (MBG) à structure amorphe afin d'ioniser rapidement le calcium et le phosphore dans la cavité buccale, permettant ainsi la transformation des surfaces dentaires déminéralisées en hydroxyapatite. Il offre en outre une protection contre les bactéries cariogènes et les substances acides.

Indications

- Reminéralisation des surfaces dentaires fragilisées au stade initial de la carie et en cas de lésions de type tache blanche.
- Reminéralisation des surfaces dentaires fragilisées après des soins dentaires tels que le détartrage, le blanchiment ou les traitements orthodontiques.
- Reminéralisation des surfaces dentaires vieillies en lien avec un recul gingival, une hypersensibilité ou une décoloration.
- Reminéralisation des surfaces dentaires à des fins de prévention et d'atténuation de la sensibilité dentaire.

Composition

MBG (verre bioactif mésoporeux), fluorure de sodium, eau distillée, glycérine

Mode d'application

1. Avant l'application

Vérifier la date de péremption et s'assurer que l'emballage n'est pas contaminé.

Lire et suivre les instructions d'utilisation du fabricant.

Se brosser les dents ou bien se rincer la bouche avec de l'eau.

2. Application

2-1 Application avec gouttière

Rincer soigneusement la gouttière sous l'eau courante.

Extruder une quantité suffisante de Desens Bio-Care pour couvrir la surface de la gouttière, puis placer la gouttière sur les dents supérieures et/ou inférieures.

Laisser la gouttière en place dans la bouche pendant au moins 3 minutes.

Retirer la gouttière.

Demander au patient d'utiliser sa langue pour répartir uniformément le Desens Bio-Care restant dans toute la bouche, et de le conserver le plus longtemps possible (au moins 2 minutes) sans recracher ni avaler. Plus le Desens Bio-Care et la salive restent longtemps dans la bouche, plus le résultat sera efficace.

Rincer les résidus de Desens Bio-Care avec de l'eau. Conseiller au patient de ne pas manger ni boire pendant 1 heure.

2-2 Application sans gouttière

Appliquer une quantité appropriée de Desens Bio-Care sur un coton-tige, une brosse ou un doigt ganté, puis étaler uniformément sur la surface des dents.

Laisser le produit dans la bouche pendant au moins 3 minutes.

Demander au patient d'utiliser sa langue pour répartir uniformément le Desens Bio-Care restant dans toute la bouche, et de le conserver le plus longtemps possible (au moins 2 minutes) sans recracher ni avaler. Plus le Desens Bio-Care et la salive restent longtemps dans la bouche, plus le résultat sera efficace.

Rincer les résidus de Desens Bio-Care avec de l'eau. Conseiller au patient de ne pas manger ni boire pendant 1 heure.